


Sabina

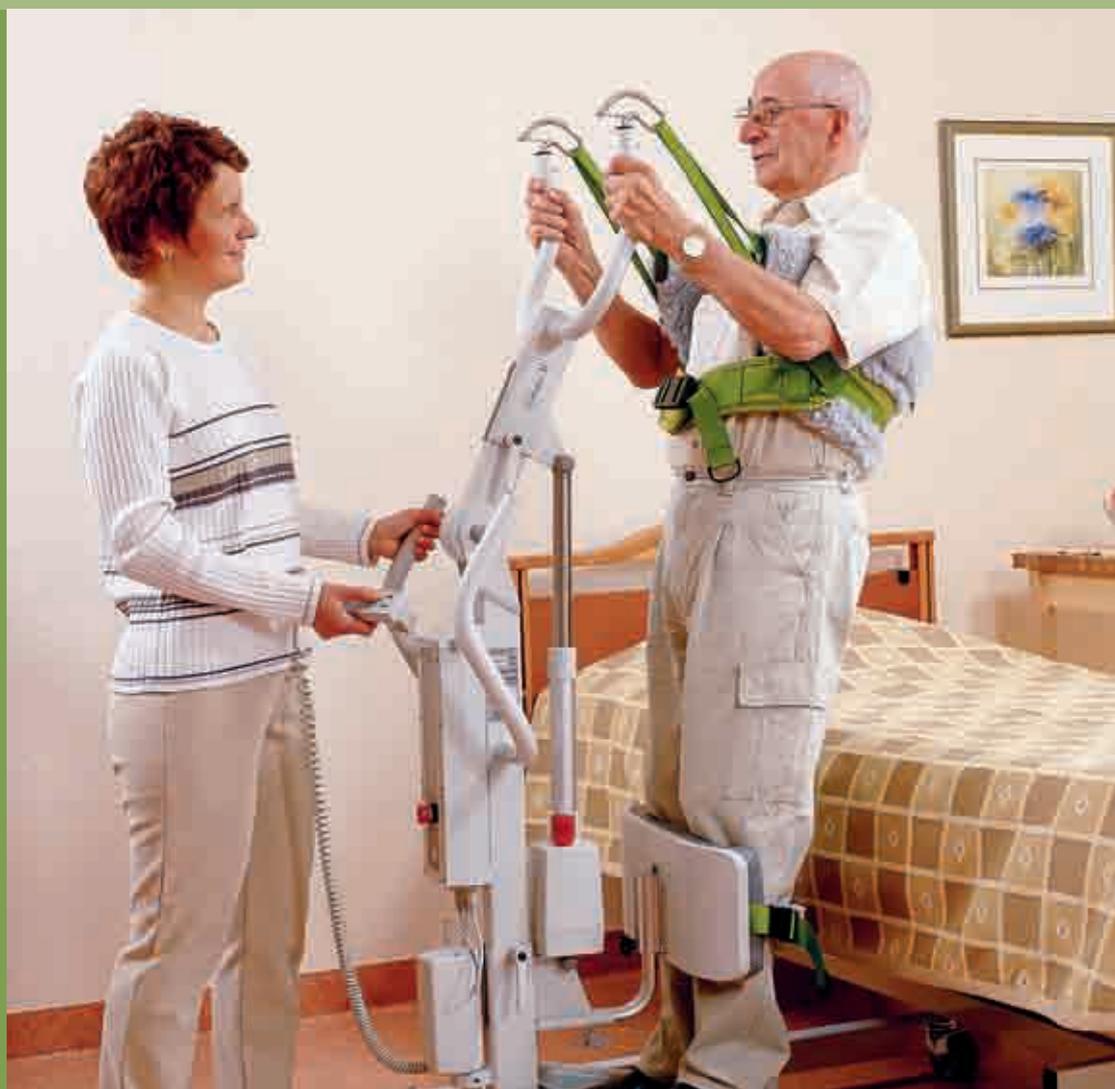

Sabina

l'ergonomia nel sollevamento.

Sabina è un ottimo supporto nel sollevamento in piedi. Si tratta di un dispositivo unico nel suo genere, contraddistinto da una grande versatilità d'uso. Un amico al quale affidarsi quando ce n'è bisogno.

Comodo supporto direzionale
A vantaggio della manovrabilità

Comando manuale
Due velocità.

Arresto d'emergenza

Salita e discesa di emergenza elettrica
Oltre alla discesa di emergenza meccanica.

Display digitale
Visualizza lo stato di carica delle batterie.

Caricabatterie incorporato
Il caricabatterie incorporato è sempre fornito con il sollevatore. Le batterie si caricano inserendo la spina in una presa di corrente a parete.

Altezza di sollevamento regolabile
Tre livelli di sollevamento.

Ruote bloccabili





Supporto imbragatura con ganci di sicurezza
Impedisce lo sganciamento accidentale dell'imbragatura e rende il sollevamento sicuro.

Supporto imbragatura intercambiabile
Due modelli.

Movimento esente da rischi di schiacciamento
Attuatore con fusibile elettrico a trazione.

Discesa di emergenza meccanica
Oltre a quella elettrica, per ulteriore sicurezza c'è anche la discesa di emergenza meccanica.

Supporto Ginocchia regolabile
Comodamente imbottito, per ridistribuire la pressione

Cinghia di sicurezza per gli arti inferiori
Assicura la posizione delle gambe.

Supporto arti inferiori asportabile
Design antiscivolo e predisposizione per il supporto talloni.

Allargamento della base
Semplice regolazione elettrica o manuale.



Versatilità



Sabina con manubrio di sollevamento 350 e imbragatura toracica.



Sabina per sollevamento da seduto. Qui con imbragatura originale Liko, mod. 10.

Tre sollevatori in uno.

Sabina si differenzia dagli altri tipi di sollevatori. I pratici accessori consentono di avere le possibilità di vari sollevatori riuniti in uno solo. La possibilità di adeguare la funzione di sollevamento a ciascun paziente offre, ovviamente, risultati migliori che non l'uso di uno stesso meccanismo uguale per tutti.

Affinché il sollevatore Sabina sia adatto a varie situazioni di sollevamento, Liko ha sviluppato un concetto tecnico con il quale, semplicemente cambiando la barra superiore, è possibile usarlo in due modi diversi nel sollevamento e nello spostamento verso la posizione seduta. Inoltre, il sollevatore Sabina può essere utilizzato in molti casi per trasferire il paziente da seduto a seduto.

Con tre modelli di imbragature toraciche e numerosi modelli di imbragature di sollevamento, le possibili varianti diventano moltissime.



Sollevamento 1 (sotto le braccia)

Quando si usa il sollevatore Sabina con la barra mod 350, l'imbragatura deve essere del tipo in cui le braccia si trovano all'esterno.

Le alternative, in questo caso, sono due: imbragatura toracica Liko e giubbotto di sicurezza Liko. L'imbragatura toracica è semplice da utilizzare e si adatta al paziente senza necessità di regolazioni individuali. Il giubbotto di sicurezza si usa per avere una maggiore tranquillità nel sollevamento di pazienti con funzioni fisiche ridotte.

Sollevamento 2 (sopra le braccia) →

Il sollevatore Sabina con barra Comfort ha caratteristiche speciali. Questo abbinamento, unito all'imbragatura Comfort, solleva il paziente in posizione eretta senza fare pressione sotto le ascelle. L'imbragatura Comfort solleva dietro la schiena, al di sopra delle braccia e attorno al tronco. Il paziente può collaborare attivamente afferrando la barra trasversale. Ideale per pazienti affetti da emiplegia.



Sollevamento da seduto, se necessario.

Anche se il sollevatore Sabina è stato realizzato per il sollevamento in piedi del paziente, con un'imbragatura adatta può essere utilizzato anche per sollevare il paziente in posizione seduta. In tal caso, la sponda per le gambe e la pedana possono essere rimosse per aumentare lo spazio disponibile.



Sabina con manubrio Comfort e fascia di sollevamento Comfort.

Un fantastico ausilio
che agevola
le funzioni igieniche



Un ponte fra i periodi attivi
e quelli passivi nella
giornata del paziente

Sollevatevi!

Il movimento di sollevamento del Sabina, con baricentro vicino al paziente, risulta essere il più efficiente. Un movimento regolare e controllato che offre al paziente un buon controllo e sicurezza nel sollevamento.

Sabina è il risultato di accurati studi e approfondite analisi di geometria e dinamica del corpo umano. Sabina solleva con un baricentro vicino al corpo del paziente, facilitando il sollevamento di persone dal tono muscolare molto basso.

Sabina tra una situazione e l'altra

Il sollevatore Sabina non va visto soltanto come un ausilio per il sollevamento, ma come un ponte fra periodi attivi e passivi nella vita del paziente. Per un periodo piuttosto lungo il Sabina può rimanere inutilizzato e poi servire quando il paziente va incontro a periodi di minore mobilità. Sabina è anche adatto alla riabilitazione deambulatoria, che rinforza lo scheletro e migliora la circolazione sanguigna.



Sabina disponibile anche con allargamento manuale della base. Qui con imbragatura toracica.



Sabina con supporto laterale e giubbotto di sicurezza.

il migliore sollevamento



L'imbragatura e la barra di sollevamento giusti per il paziente.

Accessori ben selezionati consentono varie possibilità con il sollevatore Sabina. La scelta della barra e dell'imbragatura permettono un sollevamento ottimale.



Giubbotto di sicurezza (mod. 93) con barra di sollevamento 350

Per un paziente meno stabile. Il giubbotto di sicurezza è costruito in modo da tenere fermamente il paziente in posizione stabile durante tutto il sollevamento. Offre piena sicurezza quando le gambe non reggono. Il giubbotto di sicurezza può essere completato con le imbottiture. Il supporto laterale (opzionale) offre un sostegno supplementare al paziente in posizione eretta.


Giubbotto di sicurezza con supporto supplementare per la schiena (mod. 94)

Modello speciale di giubbotto di sicurezza, mod. 94, dispone di un supporto supplementare per la schiena per ripartire la pressione su un'ampia superficie della schiena.



Fascia di sollevamento (mod. 95) con barra di sollevamento Comfort

Si differenzia dall'imbragatura toracica e dal giubbotto di sicurezza. La fascia sostiene il paziente dietro la schiena e sopra le braccia. In tal modo non preme sulle ascelle, che in alcuni pazienti sono molto sensibili. Soluzione ideale per pazienti emiplegici.

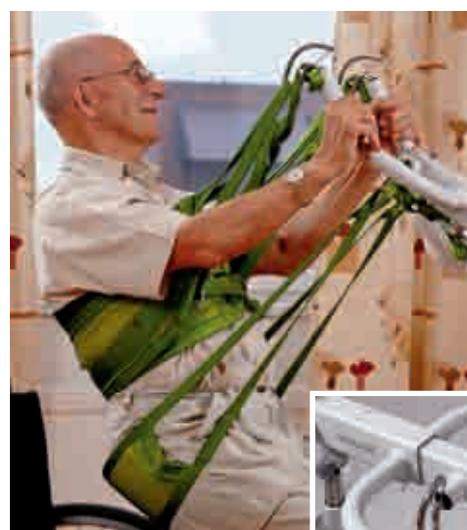

Imbragatura toracica (mod. 91) con barra di sollevamento 350

Per pazienti che hanno bisogno di molto aiuto nella parte iniziale del sollevamento ma che poi rimangono stabilmente in piedi. Sostiene il paziente dietro la schiena e sotto le braccia. Imbottitura asportabile e lavabile che ripartisce la pressione in modo confortevole.



Fascia per glutei Sabina

A volte è necessario un aiuto extra per sollevarsi. La fascia si applica sotto i glutei e aiuta nella prima parte del sollevamento. La fascia per glutei va collegata ai ganci della fascia per glutei (opzionali).



Gli accessori adatti
e l'impostazione corretta
fanno metà del
sollevamento



Regolazione personalizzata

Sono i piccoli dettagli che fanno l'insieme. Il sollevatore Sabina dispone di molte raffinatezze tecniche, che lo rendono un ottimo prodotto. La possibilità di adeguare un sollevatore alle necessità del paziente fornisce sempre il risultato migliore. L'uso dell'imbragatura e del barra/bilancino adatti è l'altra metà del sollevamento. Sabina offre ampie possibilità di adeguamento alle varie necessità e possibilità di sollevamento del paziente.



Tre altezze di sollevamento

Le altezze di sollevamento alle quali può essere impostato il Sabina sono tre. Quella intermedia è adatta alla maggior parte dei pazienti.



Supporto regolabile per gli arti inferiori

Supporto imbottito che fornisce un comodo trasferimento. Regolabile in altezza e profondità.



Cinghia per le gambe

Cinghia imbottita che fissa fermamente le gambe. Facilmente regolabile in lunghezza.



Supporto talloni con cinghia

Il supporto talloni assicura la corretta posizione dei piedi. La cinghia può essere tirata attorno alle caviglie, per un'ulteriore sicurezza. Il supporto talloni può essere agevolmente avvitato sulla pedana.



Identificazione cromatica delle taglie

Pratica identificazione in vari colori delle taglie negli accessori di sollevamento.



Supporto laterale per arti superiori

Adatto a pazienti meno stabili. Si monta facilmente sul braccio di sollevamento.



Dati tecnici

Portata massima:	200 kg
Velocità di sollevamento:	due velocità; 4,8 cm/sec e 3,2 cm/sec senza carico.
Discesa di emergenza:	Meccanica ed elettrica
Batterie:	12 batterie sigillate da 12V 2,9 Ah regolate tramite valvole, al piombo, cosiddette batterie al gel.
Caricabatterie:	caricabatterie incorporato da 110-230 V, 50-60 Hz, max 400 mA.
Materiale:	Acciaio verniciato a polvere
Dimensioni:	Lungh X Largh X Alt 106 x 69 x 100-110 (regolabile)

Il Sabina è stato sottoposto a test accurati presso laboratori autorizzati e soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva sui dispositivi medici di classe 1 (93/42/CEE). Il sollevatore Sabina è a norma ISO 10535 e IEC 60601-1.

I prodotti Liko vengono costantemente perfezionati e ammodernati, per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, senza obbligo di preavviso.

Contattare il distributore Liko per consigli, informazioni ed eventuali aggiornamenti sulla gamma prodotti.

Accessori di sollevamento

Per tutti in sollevatori Liko è disponibile un'ampia gamma di accessori che offrono le soluzioni più adatte per i problemi di sollevamento.

Prodotto in Svezia





Liko è un'azienda specializzata nel sollevamento e trasferimento dei pazienti con difficoltà motorie. Per oltre 25 anni abbiamo progettato e prodotto con grande successo una serie di strumenti funzionali sicuri e facili da utilizzare, sollevatori mobili e fissi, imbragature e accessori. La nostra specializzazione ci consente di essere sempre all'avanguardia. Facciamo tesoro della nostra esperienza e delle nostre conoscenze per applicarle poi allo sviluppo di nuovi prodotti e metodologie.

Liko è un'azienda svedese, leader nel mercato scandinavo e rappresentata, attraverso filiali proprie e distributori indipendenti, in oltre 30 paesi.

Liko offre un servizio completo grazie a una rete di assistenza propria e in collaborazione con partner altamente qualificati.

Contattateci e saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

Liko ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 e la corrispondente certificazione specifica per il settore delle attrezzature medico-sanitarie, la ISO 13485.

A Liko è stata inoltre concessa la certificazione ambientale ISO 14001.



www.liko.com

Produttore:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå,
Sweden
info@liko.se

Distributore per l'Italia:

Hill-Rom S.p.A.
Via Ambrosoli n. 6
20090 Rodano,
Milano, Italy
Phone: 39 02 950541
Fax: 39 02 95328578

 **Liko**
A  Company