



## Facili trasferimenti con pazienti attivi

HandyBelt™ semplifica i trasferimenti brevi senza l'uso di attrezzature di sollevamento meccaniche. La cintura è impiegata con i pazienti con ridotta mobilità, ma che necessitano di un aiuto minimo per eseguire il trasferimento autonomamente. Queste situazioni, ad esempio, si verificano quando occorre trasferirsi dalla posizione seduta alla posizione eretta, da una posizione seduta ad un'altra o come sostegno per mantenere la posizione eretta durante la deambulazione.

La cintura viene applicata al paziente, in alternativa sia al paziente che all'operatore, e offre un ausilio migliore per assumere posture ergonomicamente corrette rispetto alle tecniche puramente manuali.

HandyBelt è equipaggiata con una fibbia di sicurezza forte e sicura, testata per sollecitazioni fino a 200 kg.



Occorre ricordarsi che il trasferimento con HandyBelt™ non deve essere avvertito come pesante dall'operatore. In caso contrario, ricorrere a dispositivi di sollevamento meccanici. Se il paziente ha scarsa stabilità o mobilità, si può valutare la possibilità di usare ausili meccanici, come RollOn o Sabina per il sollevamento, oppure un sollevatore abbinato ad un'imbracatura per deambulazione come MasterVest o LiftPants per la rieducazione alla deambulazione.

Leggere le istruzioni dei rispettivi prodotti per ulteriori informazioni sulle aree di applicazione e sull'uso pratico. È anche possibile contattare il rappresentante Liko più vicino per informazioni e assistenza. Troverete i nostri recapiti su [www.liko.com](http://www.liko.com).


## ■ DATI SUL PRODOTTO

Nome prodotto	Art. n.	Taglia	Carico massimo	Tessuto
HandyBelt™	3760014	S	200 kg	poliestere
HandyBelt™	3760015	M	200 kg	poliestere
HandyBelt™	3760016	L	200 kg	poliestere
HandyBelt™	3760017	XL	200 kg	poliestere

HandyBelt può essere lavata a 60-85° C.

*HandyBelt può essere usata sia sul paziente che sull'operatore, per un supporto maggiore durante i brevi trasferimenti.*

HandyBelt è dotata di un numero di maniglie da 7 a 13, a seconda della taglia. Le maniglie offrono una buona presa per il paziente o per l'operatore e vengono posizionate sia orizzontalmente che verticalmente lungo l'intera cintura. HandyBelt è disponibile in quattro taglie, da S a XL. Ogni taglia è caratterizzata da un colore brillante, per una facile identificazione.

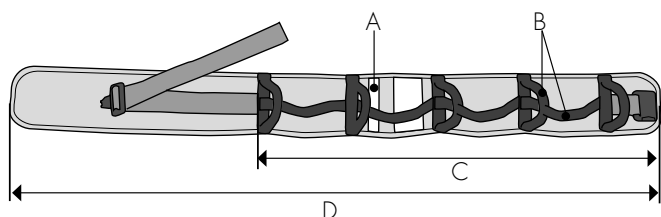

Codice colore in base alla taglia (A)	Numero di maniglie (B)	Lunghezza (C/D)
Small arancione	7	60/100 cm
Medium giallo	9	75/120 cm
Large blu	11	90/140 cm
Extra Large nero	13	110/180 cm



*Il colore brillante indica la taglia e le robuste maniglie offrono una buona presa.*



HandyBelt è un dispositivo medico di Classe I.

HandyBelt è conforme con i requisiti delle Direttive per i dispositivi medici di Classe I (MDD 93/42/CEE).

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa conforme a ISO 9001 e all'equivalente specifica per il settore dei dispositivi medici, ISO 13485. Liko ha anche ottenuto la certificazione in conformità con lo standard ambientale ISO 14001.



[www.liko.com](http://www.liko.com)

### Produttore:

Liko AB  
Nedre vägen 100  
SE-975 92 Luleå,  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

Hill-Rom S.p.A.  
Via Ambrosoli n. 6  
20090 Rodano,  
Milano, Italy  
Phone: 39 02 950541  
Fax: 39 02 95328578

 **Liko**  
A  Company